

Lentilles de contact souples de port journalier à base de delefilcon A

  **NOTICE D'UTILISATION**

CETTE NOTICE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE MODE D'UTILISATION DES LENTILLES AINSI QUE DES INFORMATIONS DE SECURITE. VEUILLEZ LA LIRE ATTENTIVEMENT ET LA CONSERVER AFIN DE POUVOIR LA CONSULTER ULTERIEUREMENT. LES LENTILLES DE CONTACT DOIVENT TOUJOURS ETRE ADAPTEES PAR UN SPECIALISTE. SUIVEZ LES INDICATIONS DE VOTRE SPECIALISTE ET LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE VOS LENTILLES DE CONTACT.

NOM DU PRODUIT

DAILIES TOTAL^①*

MATERIAU ET CONDITIONNEMENT

Les lentilles de contact souples DAILIES TOTAL^①* contiennent 67% de delefilcon A et 33% d'eau, avec de la phosphatidylcholine. Grâce à un gradient d'eau, le cœur du matériau contient 33% d'eau et la surface en contient plus de 80%.

Cette structure avec un gradient d'eau permet à la lentille silicone hydrogel de bénéficier :

- de plus de 80% d'eau à la surface de la lentille mimant la teneur en eau de la cornée.
- d'une haute transmissibilité à l'oxygène à travers la lentille.
- d'une exceptionnelle lubrification pour réduire la friction.
- d'un excellent confort jusqu'en fin de journée.

Ces lentilles contiennent et libèrent la phosphatidylcholine (DPMC) qui est un phospholipide présent naturellement dans les larmes.

Les lentilles sont teintées en bleu clair pour faciliter la manipulation ; la teinte contient de la phthalocyanine de cuivre.

Les lentilles de contact DAILIES TOTAL^①* sont emballées par plaquette de 5 blisters individuels contenant une solution saline isotonique tamponnée avec environ 0,3% d'agents mouillants polymériques composés de copolymères de polyamidoamine et de poly (acrylamide-acide acrylique).

Les lentilles sont stérilisées par la vapeur.  N'utiliser que si les blisters sont intacts.

INDICATION

Les lentilles de contact DAILIES TOTAL^①* sont indiquées pour un port journalier (moins de 24 heures, en période d'éveil) pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime qui ne gêne pas leur vue.

Les lentilles de contact DAILIES TOTAL^①* sont à usage unique et uniquement en port journalier.



PORT RECOMMANDE ET FREQUENCE DE RENOUELEMENT

Les lentilles de contact DAILIES TOTAL^①* sont indiquées pour être portées une fois, et ensuite être jetées à la fin de chaque période de port. Le temps de port journalier maximal doit être déterminé par votre ophtalmologiste.

Les lentilles de contact DAILIES TOTAL^①* n'ont pas été conçues pour être utilisées avec des solutions de rinçage ou des systèmes de décontamination. Vos lentilles doivent être jetées après utilisation. Commencez chaque nouvelle période de port avec une nouvelle paire de lentilles.

VOUS NE DEVEZ PAS DORMIR AVEC VOS LENTILLES. Les lentilles de contact DAILIES TOTAL^①* n'ont pas été conçues pour être portées pendant le sommeil.

MANIPULATION DE VOS LENTILLES

Votre ophtalmologiste vous communiquera des informations détaillées concernant la pose et le retrait des lentilles de contact.

Il faut toujours se laver et se sécher les mains avant de manipuler les lentilles.

Agitez délicatement le blister avant l'ouverture. Retirez la pellicule qui recouvre le blister. Faites glisser la lentille dans la paume de votre main, ou, si nécessaire, retirez doucement la lentille hors du blister avec votre index. Assurez-vous que la lentille est dans le bon sens et que c'est bien celle de l'œil à corriger. Examinez la lentille avant de la poser. Ne la posez pas si elle est endommagée.

Lors du retrait de la lentille, assurez-vous que vos mains sont propres et complètement sèches. Clignez des yeux complètement, à plusieurs reprises, et ensuite, en regardant vers le haut, faites glisser la lentille vers le bas sur la partie blanche de l'œil. Enlevez la lentille en la pinçant doucement entre le pouce et l'index. Ne pas pincer le tissu oculaire.

Si la lentille est difficile à saisir en raison de sa lubrification, séchez-vous les doigts une nouvelle fois et réessayez. Ne pas utiliser de gouttes de réhydratation dans ce cas.

N'utilisez jamais de pinces, de ventouses adhésives, d'objet pointu ou les ongles pour enlever les lentilles de leur étui/du blister ou des yeux.

SI VOUS VOUS ENDORMEZ ALORS QUE VOUS PORTEZ VOS LENTILLES

Si vous vous endormez pendant une courte période alors que vous portez vos lentilles aucun incident grave n'est supposé survenir. Ces lentilles peuvent cependant être inconfortables, ceci peut généralement être soulagé en clignant des yeux plusieurs fois.


DANS QUELS CAS NE PAS PORTER DE LENTILLES

Les lentilles de contact ne doivent pas être portées dans certaines conditions de santé ou lorsque l'environnement ne le permet pas. Les conditions pouvant perturber la sécurité et le confort du port de lentilles de contact sont entre autres :

- Allergie, inflammation, infection ou irritation dans ou autour de l'œil et des paupières.
- Des périodes où l'état de santé général est affaibli (ex. rhume sévère, grippe).
- Utilisation de certains médicaments, y compris les médicaments oculaires.
- Production du film lacrymal insuffisante (sécheresse oculaire).
- Environnements extrêmement secs ou poussiéreux, qui rendent le port de lentilles inconfortables.
- La pratique de sports nautiques sans porter des lunettes de natation.

Consultez votre ophtalmologiste si vous êtes concerné par les conditions mentionnées ci-dessus, ou par toute autre condition.

POINTS IMPORTANTS A RETENIR

- Ce dispositif est à usage unique. La réutilisation augmente le risque d'infection ou de défaillance du dispositif liée à l'usure.
- **Ne prêtez jamais** vos lentilles de contact car ceci pourrait propager des micro-organismes et occasionner de graves problèmes oculaires.
- **Observez vos yeux régulièrement : ils doivent paraître sains, non douloureux et votre vue doit être claire.**
- **Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact de consulter régulièrement leur spécialiste comme prévu avec ce dernier.**
- N'utilisez pas les lentilles après leur date de péremption. 
- Dans des conditions de faible luminosité, les porteurs de lentilles teintées peuvent ressentir une diminution de leur acuité visuelle pour les objets à faible contraste.
- Notez la puissance exacte des lentilles pour chaque œil.
- Avant de poser la lentille, vérifiez si la puissance mentionnée sur chaque blister est correcte pour cet œil.
- Prévoyez toujours des lentilles de réserve.
- Les produits tels que les savons, les lotions, les crèmes, les cosmétiques ou les déodorants peuvent être à l'origine d'irritations s'ils entrent en contact avec l'œil. Utilisez-les avec prudence.
- Posez vos lentilles **avant** de vous maquiller et enlevez-les **avant** de vous démaquiller.
- Evitez de pulvériser des aérosols tels que de la laque pour les cheveux près de vos yeux lorsque vous portez vos lentilles de contact, cela pourrait entraîner une irritation.
- Consultez votre ophtalmologiste au sujet du port des lentilles durant les activités sportives, telles que la natation.
- Enlevez vos lentilles en cas d'exposition à des vapeurs nocives ou irritantes.

- **Ne jamais mettre les lentilles en contact avec des liquides non stériles (y compris l'eau du robinet et la salive) afin d'éviter toute contamination microbienne qui pourrait entraîner des dommages oculaires permanents.**
- Informez votre employeur que vous portez des lentilles de contact, surtout si votre travail implique l'utilisation d'équipements de protection oculaire.
- Jeter toute lentille de contact DAILIES TOTAL¹® qui est devenue sèche ou endommagée. Remplacez-la par une lentille neuve.

PROBLEMES EVENTUELS

Bien que le port de lentilles ait beaucoup d'avantages pour le porteur, des problèmes pourraient éventuellement se poser et apparaître sous la forme de l'un ou de plusieurs des signes suivants :

- Sensation d'avoir un corps étranger dans l'œil.
- Lentille inconfortable.
- Rougeur de l'œil.
- Sensibilité à la lumière.
- Brûlures, picotements, démangeaison ou yeux larmoyants.
- Acuité visuelle réduite.
- Arc-en-ciel ou halos autour des lumières.
- Augmentation de sécrétions oculaires.
- Gêne/Douleur.
- Sécheresse oculaire extrême ou persistante.

Si ces symptômes sont ignorés, ils peuvent entraîner des complications plus graves.

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME

Si l'un des signes ou symptômes cités ci-dessus se produit :

- **ENLEVEZ IMMEDIATEMENT LA (LES) LENTILLE(S).**
- Examinez vos yeux dans un miroir afin de déceler d'éventuelles irrégularités.
- Si la gêne ou le problème disparaît, mettez une nouvelle lentille neuve.
- Si les symptômes précités persistent après la pose d'une (des) nouvelle(s) lentille(s), enlevez **IMMEDIATEMENT** la (les) lentille(s) et contactez sans tarder votre ophtalmologiste. Une affection grave, telle qu'une infection, un ulcère cornéen, ou une iritis, pourrait se produire. Ces affections peuvent progresser rapidement et peuvent conduire à une perte permanente de la vue. Des réactions moins graves, telles que des abrasions, une coloration épithéliale ou une conjonctivite bactérienne, doivent être traitées rapidement pour éviter les complications.

- Si une lentille adhère à l'œil (ne bouge plus), appliquez quelques gouttes de solution lubrifiante et attendez jusqu'à ce que la lentille commence à bouger librement dans l'œil. Si ce problème persiste, consultez votre ophtalmologiste.
- Une sécheresse occasionnelle peut être soulagée en clignant des yeux complètement plusieurs fois ou en utilisant des gouttes lubrifiantes et hydratantes. Si la sécheresse persiste, consultez votre ophtalmologiste.
- Si une lentille se décentre dans l'œil, fermer l'œil et masser doucement la paupière afin de ramener la lentille dans sa position centrale. Si le problème persiste, consultez votre ophtalmologiste.
- Si une lentille se déchire dans votre œil, vous allez ressentir un inconfort. Ne vous inquiétez pas, puisqu'il est impossible de perdre une lentille ou une partie de lentille à l'arrière de l'œil. Enlevez délicatement les morceaux en les pinçant comme vous le feriez normalement pour le retrait d'une lentille. S'il est difficile d'enlever les morceaux, évitez de pincer le tissu oculaire. Rincez l'œil avec une solution saline. Si le problème persiste, contactez votre ophtalmologiste.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le risque d'un problème éventuel peut être réduit en détectant les signes et en suivant les conseils de la rubrique «Que faire en cas de problème».

Le port de lentilles de contact augmente le risque d'infections oculaires. Dormir en portant ses lentilles pour une plus longue durée et/ou fumer augmente encore plus le risque de kératite ulcéreuse chez les porteurs de lentilles de contact.



FABRICANT :

Alcon Laboratories, Inc.
6201, South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, Etats-Unis



0086



MANDATAIRE DANS L'UE :

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, Royaume-Uni

DISTRIBUÉ PAR :

Laboratoires Alcon
4, rue Henri Sainte-Claire Deville
92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX - France

ABRÉVIATIONS DES SPÉCIFICATIONS DES LENTILLES :

DIA	Diamètre
BC	Rayon de courbure
PWR	Puissance
L	Gauche
R	Droite

Date d'émission : 10/2014
© 2014 Novartis, 91013679