

OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination
NOTICE pour toutes les tailles de flacons

{code Langage ISO} Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

OPTI-FREE® PureMoist®

Solution Multi-Fonctions de Décontamination – Pour toutes les lentilles de contact souples et en silicone hydrogel

ACTIONS :

Lorsqu'il est utilisé selon la notice, **OPTI-FREE® PureMoist®** :

- **Nettoie** en éliminant les dépôts lipidiques et protéiques de la surface de vos lentilles lors de la décontamination et de la conservation.
- **Désinfecte** : Biocompatibles, les deux décontaminants POLYQUAD® et ALDOX® sont efficaces contre les micro-organismes nuisibles (bactéries, champignons et *Acanthamoeba*).
- **Rince** : Peut être utilisé pour rincer **et** rénover vos lentilles de contact à tout moment.
- **Conserve** : Est formulé pour conserver vos lentilles jusqu'à 30 jours après la décontamination.
- **Assure un confort tout au long de la journée** : Grâce à **HydraGlyde®**, **matrice hydratante**, qui attire l'hydratation sur vos lentilles et les maintiennent hydratées tout au long de la journée. Elle maintient une couche permanente d'hydratation qui permet à votre paupière de glisser sur la surface de la lentille sans irritation.

Aucun nettoyant enzymatique distinct n'est nécessaire si vous utilisez quotidiennement **OPTI-FREE® PureMoist®**.

Ne pas remplacer **OPTI-FREE® PureMoist®** par une solution saline pour conserver vos lentilles de contact. Une solution saline ne décontamine pas les lentilles.

INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL:

- Retirez complètement la bague de sécurité présente autour du bouchon avant utilisation.
- Lavez-vous et séchez-vous systématiquement les mains avant de manipuler vos lentilles.
- Nettoyez, rénovez, rincez et décontaminez vos lentilles chaque fois que vous les retirez.
- Commencez toujours la manipulation par la même lentille, droite ou gauche, pour éviter de les confondre.

- Après utilisation, videz toujours le contenu de l'étui de trempage, rincez-le avec de l'**OPTI-FREE® PureMoist®** et laissez-le sécher à l'air. Ne pas laver l'étui de trempage avec de l'eau.

POUR UN RESULTAT OPTIMAL, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS :

1. **Mouillez** chaque face de la lentille avec **OPTI-FREE® PureMoist®**. Massez la lentille pendant 20 secondes.
2. **Rincez** chaque face de la lentille pendant 10 secondes avec un jet constant d'**OPTI-FREE® PureMoist®**.
3. **Remplissez** votre étui de trempage ALCON® avec une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® PureMoist®**. **Conservez** les lentilles dans l'étui de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Après rinçage, les lentilles sont prêtes à être portées.

Si des débris restent sur vos lentilles de contact, rincez-les avec **OPTI-FREE® PureMoist®** avant la pose. Vous pouvez laisser les lentilles dans leur étui de trempage fermé et contenant **OPTI-FREE® PureMoist®** jusqu'à 30 jours. Au-delà, vos lentilles doivent être à nouveau nettoyées et décontaminées avec **OPTI-FREE® PureMoist®** avant d'être portées.

Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Ne changez pas les instructions d'entretien de vos lentilles ou votre solution d'entretien sans consulter votre spécialiste.

DESCRIPTION :

OPTI-FREE® PureMoist® est une solution aqueuse, stérile, tamponnée contenant du citrate de sodium, du chlorure de sodium, de l'acide borique, de l'aminométhylpropanol, du sorbitol, de l'édétate disodique, deux agents mouillants (TETRONIC® 1304† et HydraGlyde® Matrice hydratante [EOBO-41- polyoxyéthylène-polyoxybutylène]) et les conservateurs POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001% et ALDOX® (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0006%. HydraGlyde® Matrice hydratante est un copolymère séquencé multi-fonctions déposé, principalement conçu pour hydrater et lubrifier les lentilles en silicone hydrogel.

†TETRONIC® est une marque déposée de BASF.


INDICATIONS (Utilisations) :


A utiliser quotidiennement pour le nettoyage, la rénovation, le rinçage, l'élimination des dépôts protéiques, la prévention des dépôts lipidiques, la décontamination chimique (non thermique) et la conservation de toutes les lentilles de contact souples (hydrophiles) et des lentilles en silicone hydrogel, selon les recommandations de votre spécialiste.


MISES EN GARDE :


Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, y compris l'étui de trempage, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice. Si vous ressentez une gêne persistante dans l'œil, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, ou une rougeur de l'œil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et consultez votre ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver.


PRECAUTIONS:

- Utilisez toujours une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® PureMoist®**. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage.
- FERMETURE DE SECURITE : Ne pas utiliser si la bague de sécurité est abîmée ou absente ou si le bouchon de sécurité est absent. 
- Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l'embout du flacon.
- Remplacez le bouchon après utilisation.
- A conserver à température ambiante.
- Ne pas conserver à une température inférieure à 15°C. Ne pas conserver à une température

supérieure à 30°C. 

- Gardez le flacon bien fermé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit. 

- Jetez toute solution restante six mois après la première ouverture. 

- Ne pas laisser à la portée des enfants. 

Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique).

PRESENTATION :

OPTI-FREE® PureMoist®, stérilisé par filtration, est disponible en flacons plastiques de 60 ml à 470 ml.

STERILE	A
---------	---

Etui de trempage ALCON® (**OPTIONNEL**)



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

Une compagnie Novartis

EC	REP
----	-----

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley

OPTI-FREE® PureMoist® MPDS (Trade) FID 114675A
Package Insert/Cartron/Bottle Label

Updated: July 2015
Catalyst Labeling Asset: 66045

GU16 7SR, Surrey
Royaume-Uni

DISTRIBUE PAR : (OPTIONNEL)

Laboratoires ALCON
4, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92563 RUEIL MALMAISON Cedex



© XXXX Novartis

* Une marque de Novartis