

# ATOOL Zen



Mode d'emploi

## Contenu

- Monture ATOLZEN
- Etui
- Essuie-verre
- Guide de démarrage rapide
- Pack piles comprenant quatre piles bouton

## Accessoires supplémentaires (fournis par ALLIANZ Assistance)

Pour un fonctionnement normal d'ATOLZEN, il est nécessaire d'avoir souscrit à l'abonnement d'ALLIANZ Assistance « solution lunettes connectées » et donc d'avoir reçu les éléments suivants :

- Transmetteur QUIATIL EASY GSM
- Câble d'alimentation électrique avec adaptateur secteur
- Notice d'utilisation du transmetteur QUIATIL

## Consignes de sécurité

- Ne pas démonter la monture pour quelque raison que ce soit.
- Ne pas laisser passer la monture sous l'eau ni la laisser à proximité de sources de chaleur (radiateurs, fours, feu)
- Laisser la monture hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin.

## Consignes pour le traitement des déchets




ATOLZEN et son pack piles sont des déchets électriques et électroniques (DEE), ne les jetez pas dans votre poubelle ménagère mais dans un lieu de collecte spécifique (supermarché, magasin de bricolage...) désigné par les autorités locales.

## Déclaration de conformité




La société ATOL les Opticiens déclare que la monture ATOLZEN est conforme aux exigences aux normes concernant la mise sur le marché de montures de lunettes optiques et de dispositifs électroniques. La déclaration de conformité complète du produit est disponible sur demande à la société ATOL les Opticiens.

## Description d'ATOL ZEN

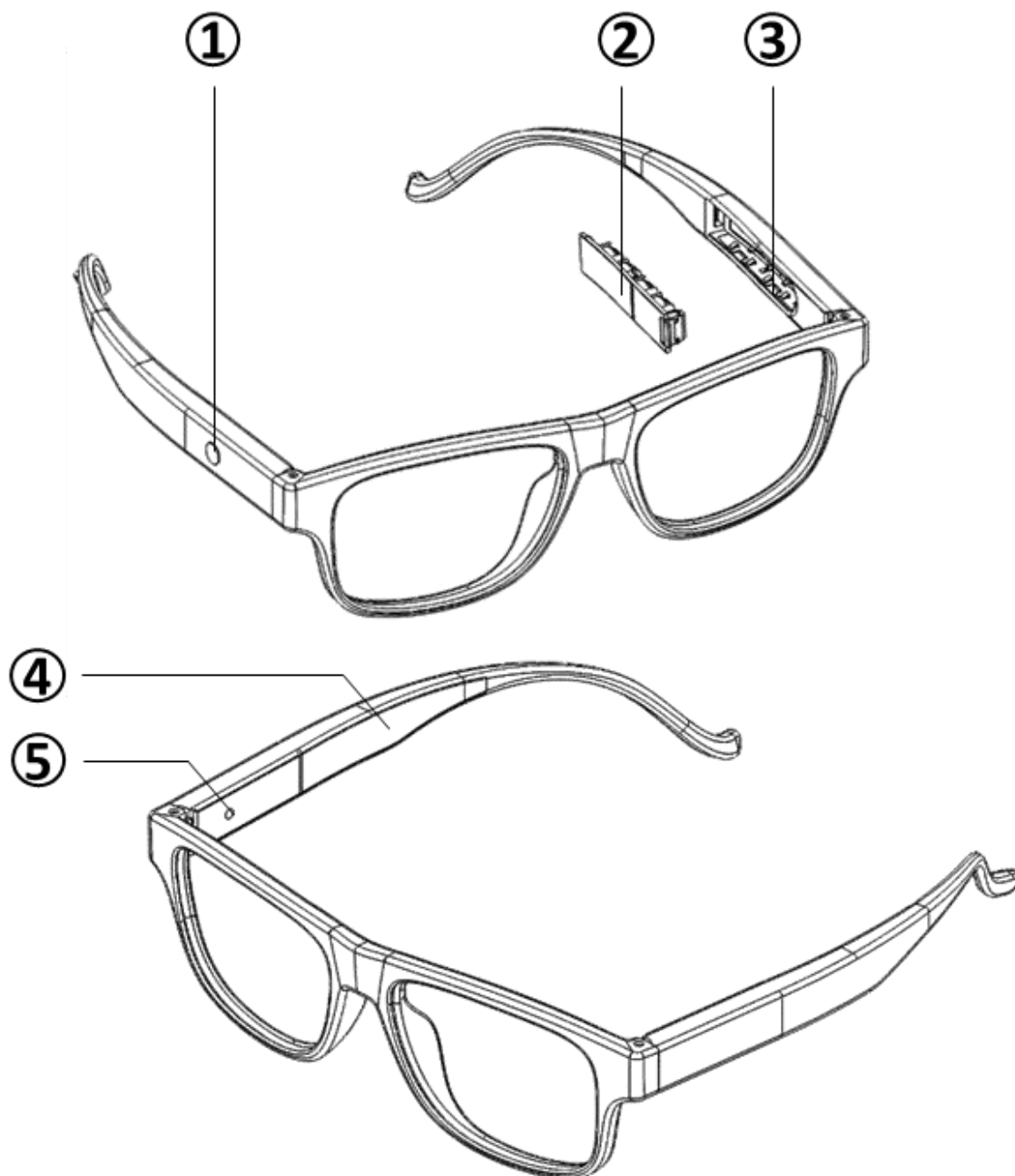

- ① Bouton d'appel
- ② Pack piles
- ③ Logement du pack piles
- ④ Indicateur lumineux (LED)
- ⑤ Indicateur vibratoire (buzzer intégré dans la branche)

## Description du Transmetteur QUIATIL EASY GSM

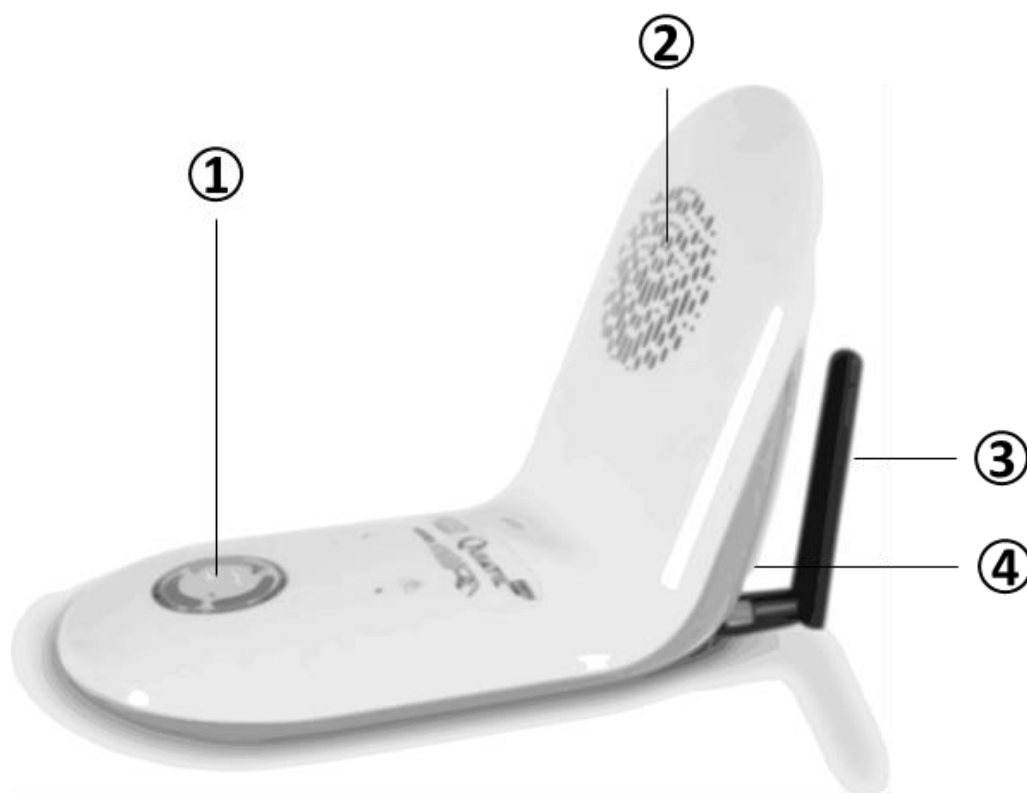


- ① **Bouton signal de détresse**
- ② **Haut-parleur**
- ③ **Antenne téléphone**
- ④ **Prise de branchement du QUIATIL**

## Mettre en marche ATOL ZEN



1

(A)  
Côté branche

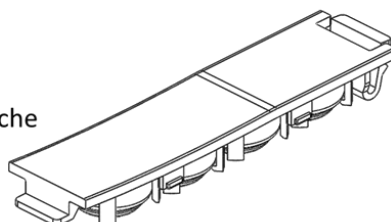


(B)  
Côté verres



2

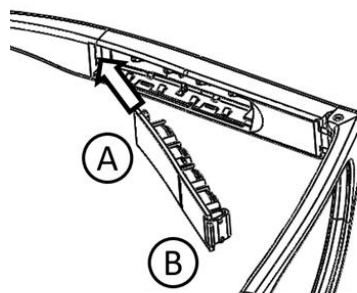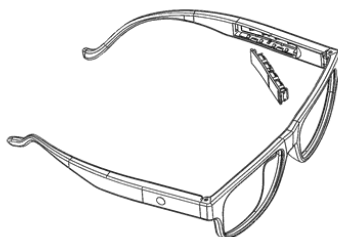



3

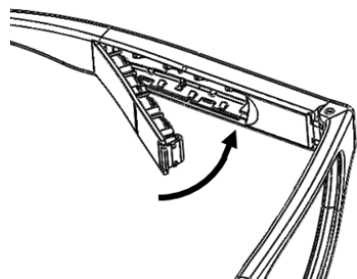

4

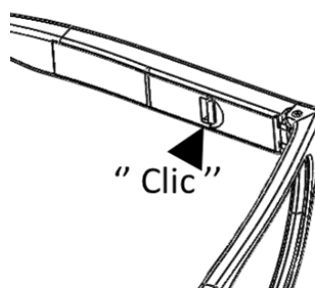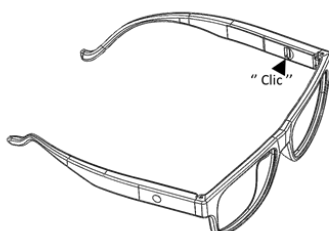

5

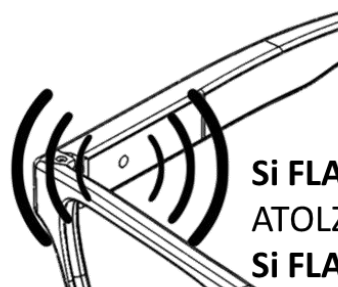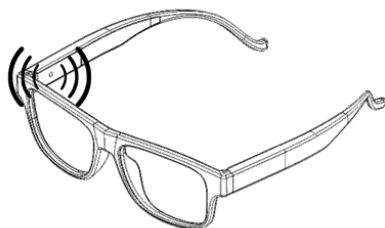

**Si FLASH VERT:**  
ATOLZEN en marche  
**Si FLASH ROUGE:**  
Changer piles


## Fonctionnement

ATOLZEN détecte la chute automatiquement et envoie un signal d'alarme à ALLIANZ Assistance. Ce signal peut aussi être envoyé manuellement grâce au bouton situé sur le branche droite d'ATOLZEN. ALLIANZ Assistance communique avec l'utilisateur d'ATOLZEN via le transmetteur QUIATIL EASY GSM.

### Alarme automatique




Fonctionne uniquement si la monture est portée par l'utilisateur

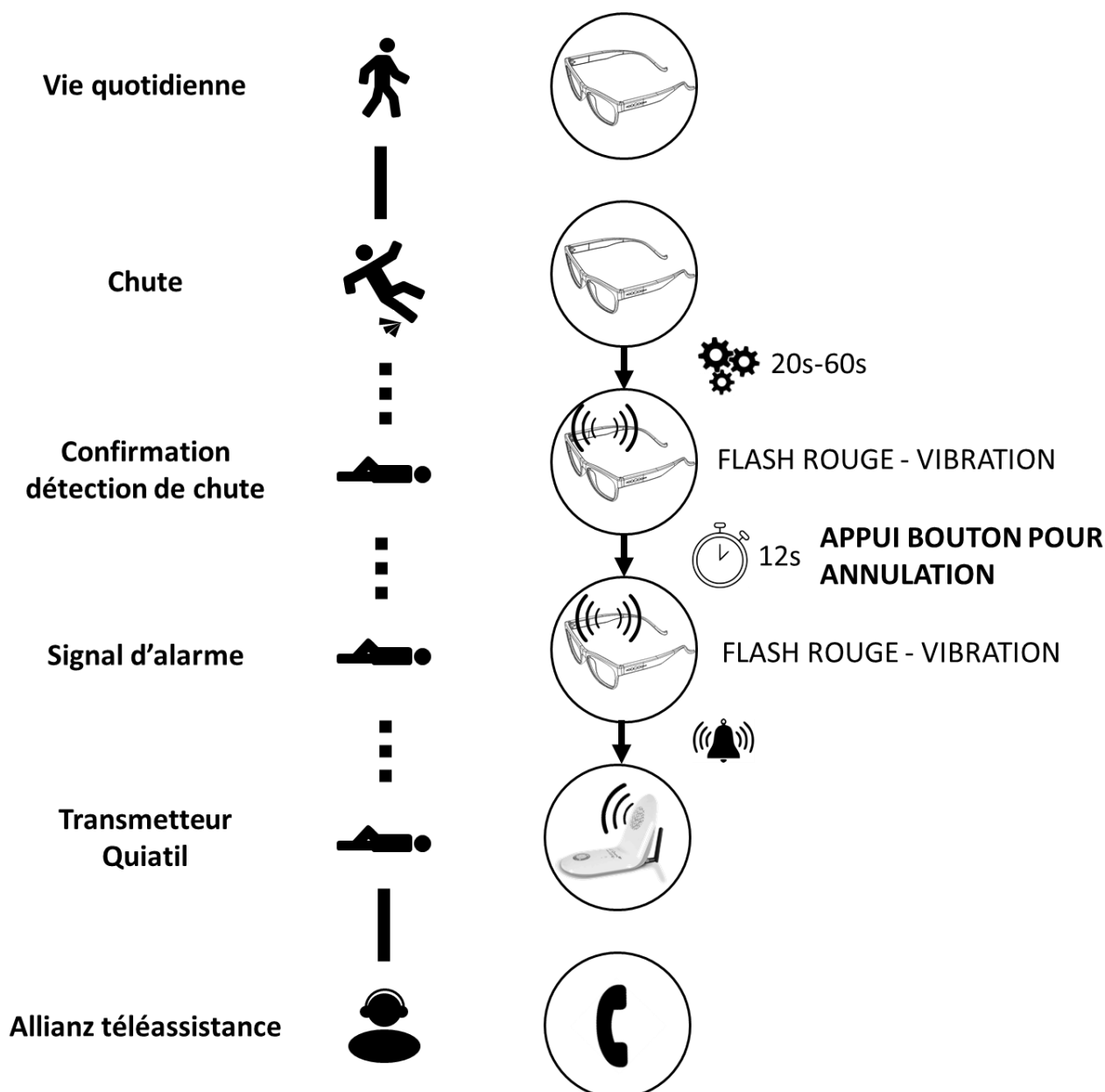

## Alarme manuelle

Un appui sur le bouton de la branche droite déclenche l'alarme manuelle.

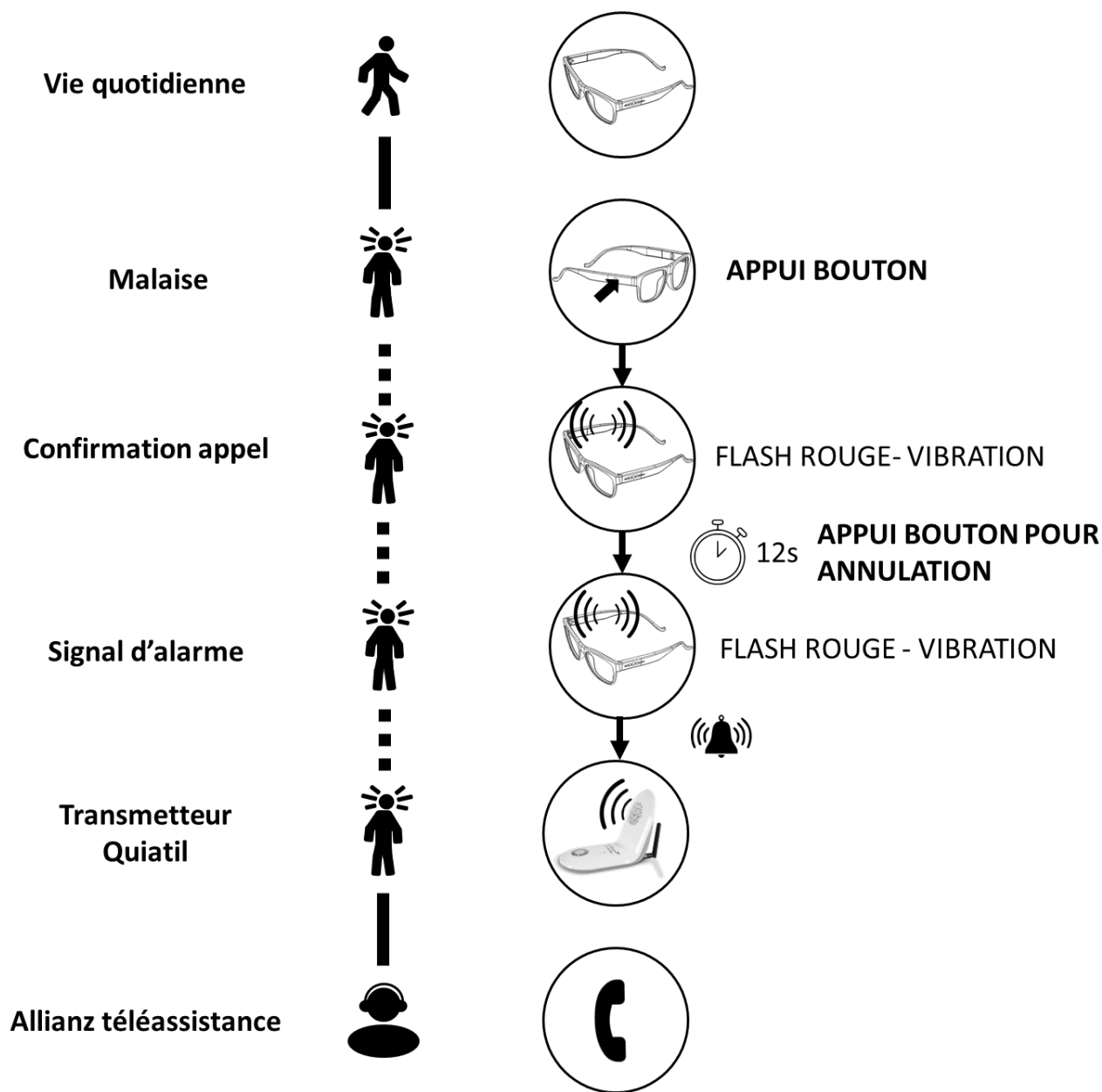

## Assistance et service après-vente

Si votre monture ATOLZEN ne s'allume pas ou ne vibre pas quand vous appuyez sur le bouton d'appel, changez les piles.

Si vous n'arrivez pas à contacter la plateforme d'assistance ALLIANZ, vérifiez la connexion entre la monture et le transmetteur QUIATIL EASY GSM.



*La portée de la monture ATOLZEN est d'une centaine de mètres autour du transmetteur QUIATIL, distance pouvant être réduite par la présence de murs.*

**Pour tout autre problème, contactez le service après-vente d'ALLIANZ Assistance : 0811 65 7000 ou consultez la FAQ sur le site internet [www.opticiens-atol.com/atol-zen](http://www.opticiens-atol.com/atol-zen).**

## Entretien

Utilisez un tissu en microfibres pour nettoyer les verres de votre lunette. Si des traces subsistent, humidifiez le tissu en microfibres à l'eau claire uniquement, sans ajout de liquide vaisselle ou autre détergent.

## Garantie

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.

**ATOL**  
LES OPTICIENS